

LEITFADEN ZUM ANLEGEN

HALYARD* OP-Kittel sind vertikal (wie ein Buch) gefaltet, sodass sie schnell und problemlos steril angelegt werden können. Führen Sie einfach die folgenden Schritte aus, um die Sterilität zu wahren.



Schritt 1: Nehmen Sie den Kittel unterhalb des Halsausschnittes auf, ohne ihn aufzufalten.



Schritt 2: Positionieren Sie die Hände in den Öffnungen der seitlich eingeklappten Ärmel.



Schritt 3: Öffnen Sie den Kittel zur Seite hin.



Schritt 4: Lassen Sie den Kittelstoff nach unten fallen. Stecken Sie die Arme in die Ärmel.



Schritt 5: Lassen Sie den OP-Assistenten/die OP-Assistentin das innere, rückwärtige Band binden und anschließend den Halsverschluss schließen.



Schritt 6: Fassen Sie mit der rechten Hand den oberen Teil der Transferkarte und ziehen Sie die linke Seite des Bands mit der linken Hand heraus.



Schritt 7: Übergeben Sie dem Assistenten/der Assistentin die Transferkarte, indem Sie ihm/ihr den unteren Teil einhalten.



Schritt 8: Wenden Sie sich nach links und ziehen Sie das Hüftband aus der Transferkarte in der Hand des Assistenten/der Assistentin. Binden Sie das Hüftband an der linken Seite des Kittels.

Weitere Informationen erhalten Sie über unser Halyard Customer Care Team:

Tel: 0800 180 22 98

Fax: 0800 180 22 97

kundendienst@hyh.com